

Teste rápido COVID-19

IgG/ IgM



Teste rápido imunocromatográfico de anticorpos IgG/ IgM, apenas para uso profissional. Com capacidade de deteção qualitativa de anticorpos contra COVID-19, em sangue total, soro ou plasma, em apenas alguns minutos.



Para monitorização de utentes, colaboradores e população em geral e diminuir o risco de surtos inesperados;



Para avaliar o estado epidemiológico, antecipando eventuais medidas de confinamento;



Para criar confiança nas medidas profiláticas adotadas.

O que inclui o kit

Todo o material necessário para testar a imunidade do indivíduo:

- Cassetes de teste;
- Pipetas capilares;
- Lancetas;
- Toalhetes de álcool;
- Diluente.

A Enzifarma S.A estabeleceu um acordo com a **Atlas Link Technology Co. Ltd.** para a comercialização de testes rápidos, desenvolvidos no epicentro desta pandemia, com **certificação CE e IVD**, bem como **registo no Infarmed**.




CDM Infarmed: 24412651

Teste rápido COVID-19


IgG/ IgM

Instruções de utilização

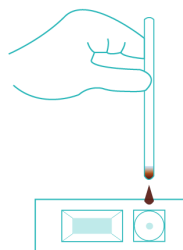

Obter uma amostra de sangue total (capilar ou venoso), soro ou plasma.

Recolher com a pipeta capilar (até à marca) e depositá-la na cassete de teste.

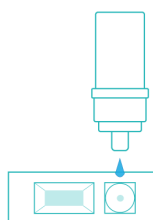


Adicionar, na cassete de teste, duas gotas do diluente fornecido.






O resultado é visível em poucos minutos.

Para evitar erros, o resultado deverá ser interpretado no máximo até 15 minutos após a sua realização.




Interpretação de resultados

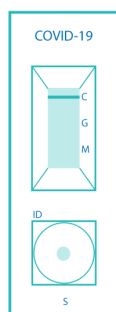

Resultado **negativo**

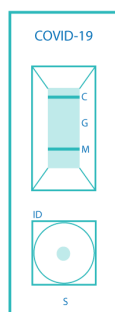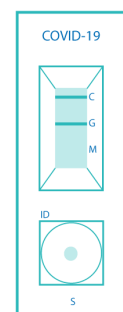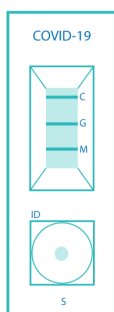

Resultados **positivos**

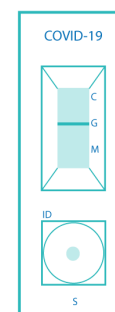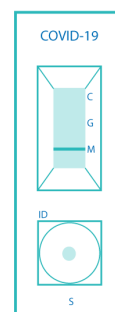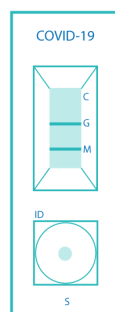

Resultados **inválidos**

Para mais informações, por favor entre em contacto com a Enzifarma S.A: